

非接触型体温計について

1. 非接触型体温計の利用方法

- 1) ディスプレイの電源が切れている場合はレバーを引いて電源を入れてください。
- 2) 額（おでこ）から 3～5cm 離して本体のレバーを握り、1～2 秒でピーッとなったら測定完了です。
- 3) 2 人目以降は手順 2) のみで体温を測定できます。
- 4) 利用終了後は 30 秒放置すると自動で電源が切れます。

2. 利用の注意点


- ・ 体温を測定できるのは 32～42.9℃までです。
- ・ ディスプレイの表示内容などについては下記をご確認ください。
- ・ 雨天時、機材が雨で濡れないように気を付けてください。

3. 機器の名称



- ① モードボタン : モードの切り替え用
体温→室温→表面温度
↑
- ② 音量ボタン : 音量調整用
- ③ メモリーボタン : メモリー表示用
- ④ ON/スキャンレバー : 電源 ON, 体温測定用

4. ディスプレイ表示の説明

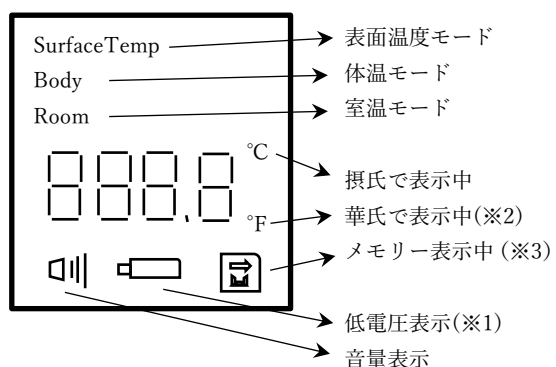


※1：電池残量がありません。単3電池2本を交換して下さい。

※2：これが表示中は華氏温度表示です。MODE ボタン長押しで°C表示に戻ります。

※3：これが表示中はメモリー表示中ですが、レバーを引けば測定できます。

5. エラー表示の説明

32°C以下の為計測不可です

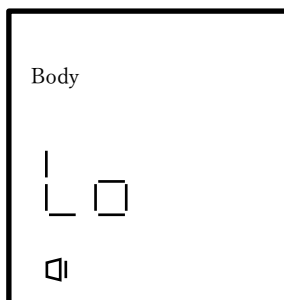

42.9°C以上の為計測不可です

